


a 1717 (Z)

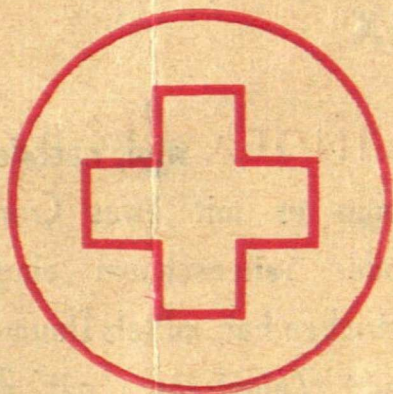

VINDEX

GESETZLICH GESCHÜTZT

VINDEX das neue mechanische Dauer-Schutzmittel der Frau, bietet infolge seiner neuen Form vom gynäkologischen Standpunkt das derzeit beste und wirksamste Mittel gegen die Empfängnis

VINDEX garantiert durch Paßfähigkeit und schmerzlosen Sitz größte Sicherheit und den vollkommen hermethischen Abschluß des Uterus


VINDEX ist chemischen Mitteln vorzuziehen, die im Einzelfall doch sehr unsicher sind

VINDEX gibt Selbstvertrauen und sorgloses Wohlbefinden


VINDEX wird nur aus Silber (900 fein) erzeugt und daher auch aus hygienischen Gründen von allen Ärzten bestens empfohlen. Beste und zweckmäßigste Reinigung wird durch Auskochen erreicht. Keine Formveränderung wie Zerreißen oder Sprödewerden, wie dies bei Gummipessaren der Fall ist. Völlig geruchlos auch bei längerem Gebrauch

VINDEX ist infolge seines geringen Gewichtes (3.5 Gr.) unfühlbar für beide Partner. Absolut unschädlich und reizlos - Spielend einfache Handhabung - Sicherster Schutz besteht sofort nach Einführen


Die Bilder 1 bis 3 geben die richtige Anleitung zum Einlegen von **VINDEX**

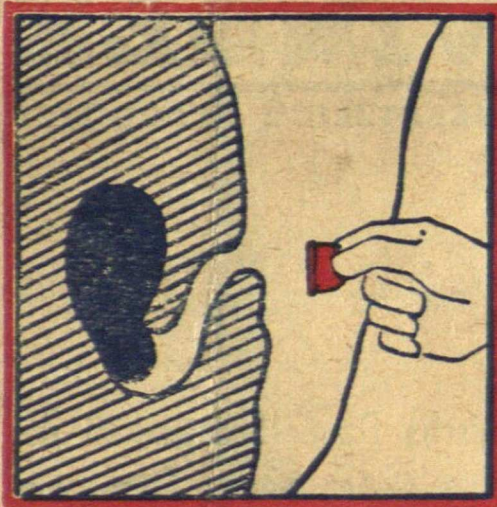

VINDEX wird, nachdem man es mit etwas Creme oder Seifenschaum eingestrichen hat, mittels Daumen und Zeigefinger, mit der Öffnung zum Körper, an den Scheideneingang gebracht

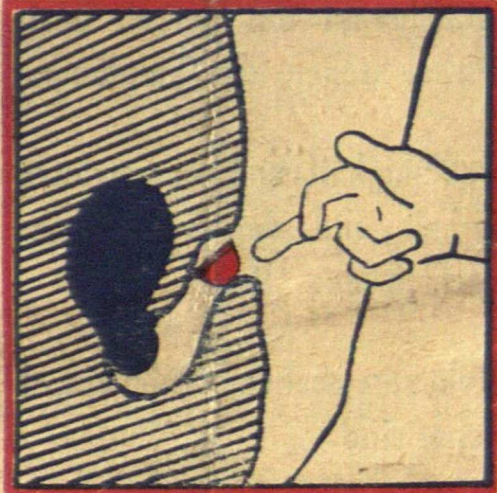

VINDEX wird mit dem Mittelfinger durch den Scheidenkanal bis zur Gebärmutter geschoben

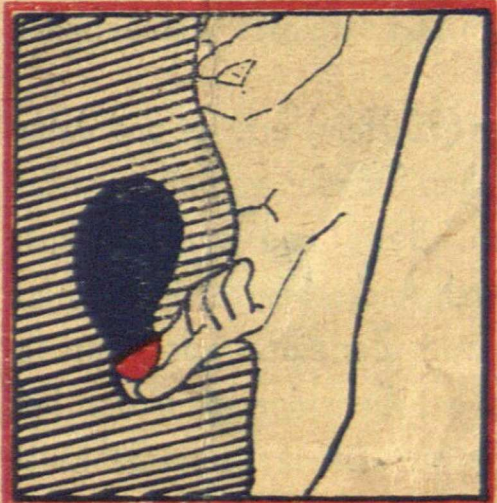

VINDEX wird sodann mit dem Mittelfinger der Gebärmutter aufgedrückt, während mit der anderen Hand auf die Bauchdecke (lt. Zeichnung) ein starker Druck ausgeübt wird

VINDEX kann auch die Zeit über bis knapp vor der monatlichen Regel an dem Uterus bleiben

VINDEX ist erhältlich in allen einschlägigen Fachgeschäften