

MULTILOAD[®] CU250

zuverlässige
Schwangerschaftsverhütung




Millionen Frauen in der ganzen Welt und in Deutschland tragen ein Intrauterin-Pessar.

Neben Pille und Sterilisation ist es die sicherste Methode moderner Empfängnisverhütung.

Schon vor 2000 Jahren entdeckte man, daß Schwangerschaften bei Tieren durch Einlagen in die Gebärmutter verhindert werden können. Seit Beginn dieses Jahrhunderts wurde intensiv geforscht, um auf der Grundlage dieser alten Erfahrungen ein zuverlässiges und einfach anzuwendendes Verhütungsmittel zu entwickeln. Seit etwa 1960 erlangte die Methode in Form des sogenannten Intrauterin-Pessars weltweite Verbreitung.

1965 entdeckte man, daß sich die Zuverlässigkeit dieser Pessare durch eine Kupferbeschichtung noch steigern läßt.

Abb. 1:
Weibliches Genital

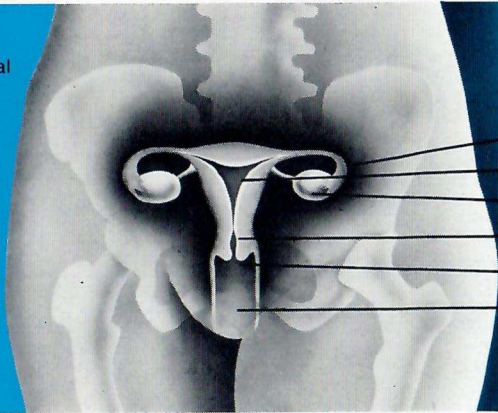

Eileiter

Gebärmutter

Eierstock

Gebärmutterhals

Gebärmuttermund

Scheide

MULTILOAD[®] CU250

Multiload Cu 250 ist ein Intrauterin-Pessar. Durch seine besondere Form und Elastizität paßt es sich dem Inneren der Gebärmutter schmiegsam an.

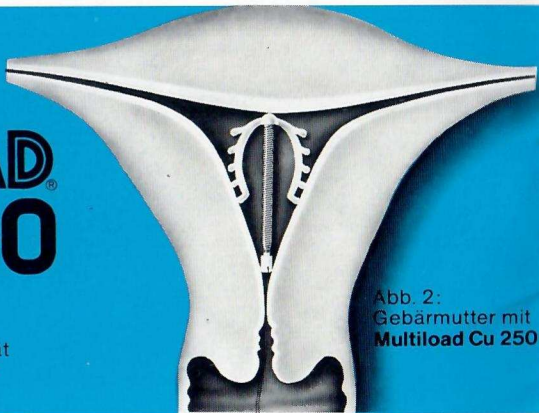


Abb. 2:
Gebärmutter mit
Multiload Cu 250

MULTILOAD CU250

Multiload Cu 250 besteht aus biegsamem sterilen Kunststoff (Polyäthylen). Der schmale Träger ist mit einer dünnen Kupferwicklung versehen. Das Kupfer hat eine Oberfläche von 250 mm². An der abgerundeten Spitze des Trägers zweigen 2 flexible, nach unten geneigte Armchen ab.

Am unteren Ende des Trägers befinden sich zwei Fäden, mit denen Ihr Arzt das **Multiload Cu 250** wieder entfernen kann.

Abb. 3:
Multiload Cu 250

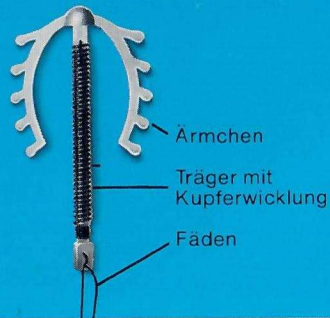


Abb. 4:
Die verschiedenen
Größen des
Multiload Cu 250



Multiload Cu 250



**Multiload Cu 250
short**



**Multiload Cu 250
mini**

Für jede Gebärmuttergröße das richtige Multiload Cu 250

Ihr Arzt wählt aus einem System von 3 verschiedenen **Multiload Cu 250** das für Sie geeignete aus:

Multiload Cu 250

Multiload Cu 250 short

Multiload Cu 250 mini

Wie wirkt Multiload Cu 250 ?

Multiload Cu 250 wird von Ihrem Arzt in die Gebärmutter eingelegt. Der Schwangerschaftsschutz beginnt sofort nach der Einlage und ist nach der Pille der zweitstärkste aller wieder rückgängig zu machenden Kontrazeptionsmethoden. Die Einnistung eines befruchteten Eies wird verhindert. Aus der Kupferwicklung werden regelmäßig kleinste Kupferteilchen freigesetzt, die die schwangerschaftsverhütende Wirkung verstärken. Die winzigen Kupferteilchen sind für den Körper unschädlich. Sie beeinflussen den Hormonhaushalt nicht.

Wie wird Multiload Cu 250 eingelegt?

Ihr Arzt führt das passende **Multiload Cu 250** nach sorgfältiger Untersuchung mit einem sterilen Röhrchen in die Gebärmutter ein.

Die am unteren Ende des **Multiload Cu 250** befestigten Fäden sind am Muttermund für Ihren Arzt sichtbar und dienen ihm zur Kontrolle.

Bezüglich der notwendigen Untersuchungen befragen Sie bitte Ihren Arzt!

In diesem Zusammenhang noch zwei wichtige Hinweise:

- Weder Sie noch Ihr Partner werden **Multiload Cu 250** beim Geschlechtsverkehr spüren!
- Tampons können ohne weiteres benutzt werden!

Welche Nebenwirkungen können unter Pessaren auftreten?

Multiload Cu 250 wird besonders gut vertragen, da die seitlichen Ärmchen Muskelbewegungen der Gebärmutter elastisch abfedern.

Unmittelbar nach Einsetzen eines Pessars können in seltenen Fällen Unterleibsschmerzen, ähnlich wie bei einer Menstruation, auftreten. Diese Beschwerden klingen üblicherweise nach einem Tag ab. Die ersten ein bis zwei Regelblutungen können früher als erwartet einsetzen sowie etwas schmerzhafter sein und länger dauern als gewöhnlich. Gelegentlich treten leichte Zwischenblutungen auf, ohne daß deshalb irgendein Grund zur Sorge besteht. Die Gebärmutter muß sich erst an das Pessar gewöhnen.

Sollte es in Ausnahmefällen zu stärkeren Beschwerden, z. B. Unterleibsentzündungen kommen, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Arzt.

Wie sicher ist Multiload Cu 250?

Die höchste Sicherheit hat **Multiload Cu 250** in den ersten 2 Jahren nach dem Einlegen. **Multiload Cu 250** sollte nach 2 Jahren erneuert werden. **Multiload Cu 250** läßt sich an den Kontrollfäden leicht aus der Gebärmutter herausziehen.

Intrauterin-Pessare können während der Menstruation von der Gebärmutter ausgestoßen werden. Eine Ausstoßung wird jedoch meist sofort bemerkt. Da sich die flexiblen Seitenärmchen des **Multiload Cu 250** der Gebärmutterform genau anpassen, sind Ausstoßungen sehr selten. Wie auch bei anderen Methoden der Empfängnisverhütung kann in äußerst seltenen Fällen trotz liegendem Pessar eine Schwangerschaft vorkommen.

Falls Ihre Blutung mehr als 2 Wochen überfällig ist oder Sie die Ausstoßung Ihres **Multiload Cu 250** bemerkt haben, sollten Sie umgehend Ihren Arzt aufsuchen!

Wie wirkt sich das Tragen von Multiload Cu 250 auf die Empfängnisfähigkeit aus?

Wenn Sie sich ein Kind wünschen, lassen Sie Ihr **Multiload Cu 250** durch den Arzt entfernen. Dies ist praktisch jederzeit möglich. Eine Schwangerschaft ist sofort nach Entfernung des Pessars möglich. Die Empfängnisfähigkeit leidet auch dann nicht, wenn Sie bereits über mehrere Jahre **Multiload Cu 250** getragen haben.



Nourypharma GmbH
8042 Oberschleißheim
bei München

Hersteller: Multilan S.A., Freiburg/Schweiz

Frau/Frl. _____

geb. am _____

wurde am _____

ein **Multiload Cu 250** eingelegt.

Das **Multiload Cu 250** ist spätestens nach _____
2 Jahren durch ein neues zu ersetzen.

Stempel und Unterschrift des Arztes

Bitte sorgfältig aufbewahren!

Den Inhalt der Broschüre

MULTILOAD CU250

**zuverlässige
Schwangerschaftsverhütung**

habe ich zur Kenntnis genommen und
bestätige, daß ich ärztlicherseits über die
Schwangerschaftsverhütung mit
Multiload Cu 250 umfassend informiert
wurde.

hier abtrennen

Datum _____

Unterschrift _____



MULTILOAD[®] CU250



Nourypharma GmbH
Mittenheimer Straße 62
8042 Oberschleißheim bei München

2 84 150

Termine
für Nachuntersuchungen

1.

2.

3.

4.

5.
